


Soundtalks Dashboard Anleitung

Sie haben erfolgreich Ihr Profil erstellt und Ihren Betrieb mit den Soundtalks Monitoren angelegt (Hilfe mit der Registrierungs-Anleitung).



Nun gelangen Sie auf das Dashboard wo Sie all Ihre Standorte auf der Landkarte sehen können und direkt eine Information zum Gesundheitsstatus (ReHS) erhalten.
Grün: alles ok
Gelb: es gibt eine Warnung
Rot: es gibt einen Alarm

Klicken Sie nun auf den Standort an der linken Seite und gelangen Sie zum detailliertem Überblick des Dashboards.

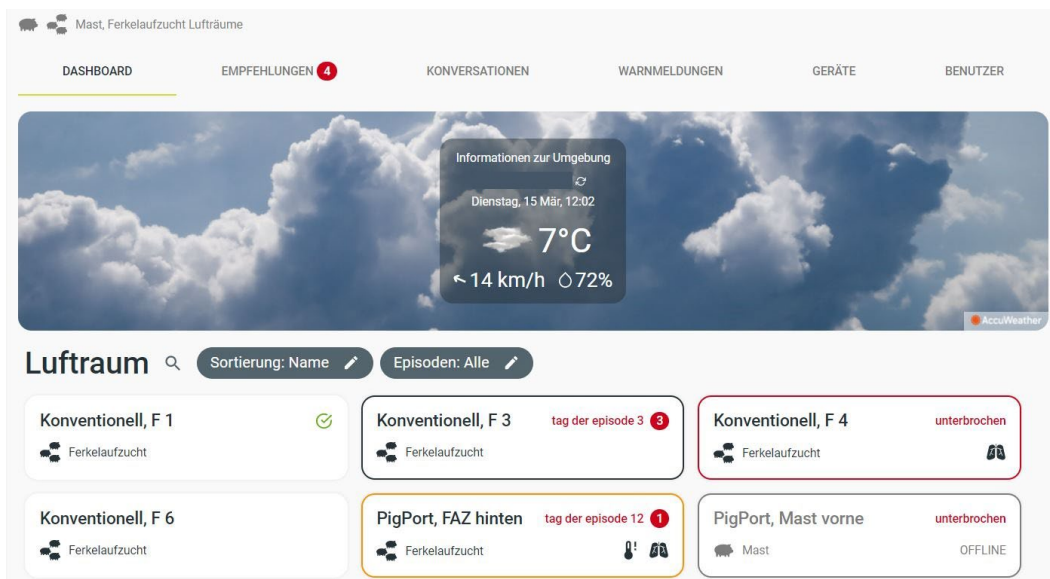

Hier sehen Sie tagesaktuell das Wetter Ihrer nächstgelegenen Wetterstation. Eine Kurz-Übersicht der letzten 24 Stunden und alle Abteile mit dem Status (Rahmenfarbe: grün, gelb, rot). Hier können Sie nun verschiedene Filter setzen, sortieren oder direkt auf ein Haus/Abteil klicken.

Bezeichnung der überwachten Gruppe



Anzahl Tage der aktuell laufenden Krankheitsepisode und Anzahl aktueller Empfehlungen

Flatdeck / Mast / Flatdeck & Mast

Hustenwarnung oder Raumklima Warnung

PigPort, FAZ hinten tag der episode 12 1
Ferkelaufzucht

Klickt man nun auf eine Kachel (Monitor), so öffnen sich die entsprechenden grafischen Darstellungen des Verlaufs des Respiratorischen Gesundheitsstatus (ReHS), der Raumklimagraph mit Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit.

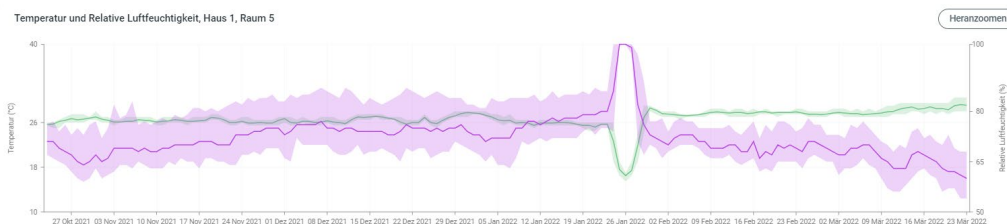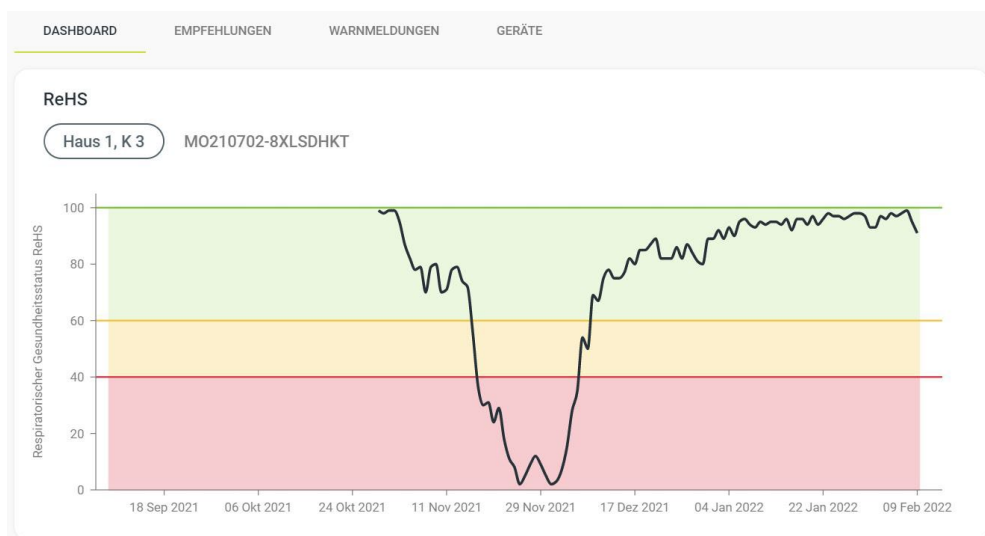


Wechselt man zu dem Reiter Empfehlungen, werden einem alle Abteile angezeigt, die eine Warnung oder einen Alarm (Episode) haben, das Datum des Anfangs und wie viele Tage die Episode bereits anhält. Öffnet man ein Abteil sieht man die verschiedenen Empfehlungen, kann sich am aktuellen Tag dafür oder dagegen Entscheiden und die Historie der Episode mit den Maßnahmen wird gespeichert. Eine Episode endet mit drei aufeinander folgenden grünen Tagen.

The screenshot shows a web application interface for farm management. At the top, there is a navigation bar with tabs: DASHBOARD, EMPFEHLUNGEN (4), KONVERSATIONEN, WARNMELDUNGEN, GERÄTE, and BENUTZER. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Sortierung: Empfehlungen' and 'Episoden: Aktiv'. The main content area displays a list of episodes. The first episode is titled 'Haus 1, Raum 3 (23 Mär 2022)' and is associated with 'Fattening', 'Aktiv', and 'Tag der Episode 1'. Below the episode title, there is a timestamp 'Mittwoch, 23 Mär, 05:01' and a section titled 'Tag der Episode 1'. A warning icon and text state: 'Achtung! Raum 3 meldet ein Risiko für Atemwegserkrankungen'. Below this, there is a section titled 'EMPFEHLUNGEN' with two buttons: 'ALLE AKZEPTIEREN' and 'ALLES ABGELEHNT'. Three recommendation items are listed, each with a thumbs up/down icon and a red exclamation mark icon:

- Überprüfen Sie im Abteibereich, in dem der Alarm angezeigt wird, die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und das Verhalten der Tiere (Futter- und Wasserverbrauch) genau.
- Wenden Sie sich an Ihre/n Tierärztin/ Tierarzt.
- Beobachten Sie die Tiere und achten Sie auf einzelne erkrankte Schweine.

At the bottom right of the recommendation list, there is a green button that says 'BEGINNEN SIE EINE NEUE BEHANDLUNG'. Below the first episode, the start of a second episode is visible: 'Haus 1, Raum 4 (09 Mär 2022)' with 'Fattening', 'Aktiv', and 'Tag der Episode 13'.

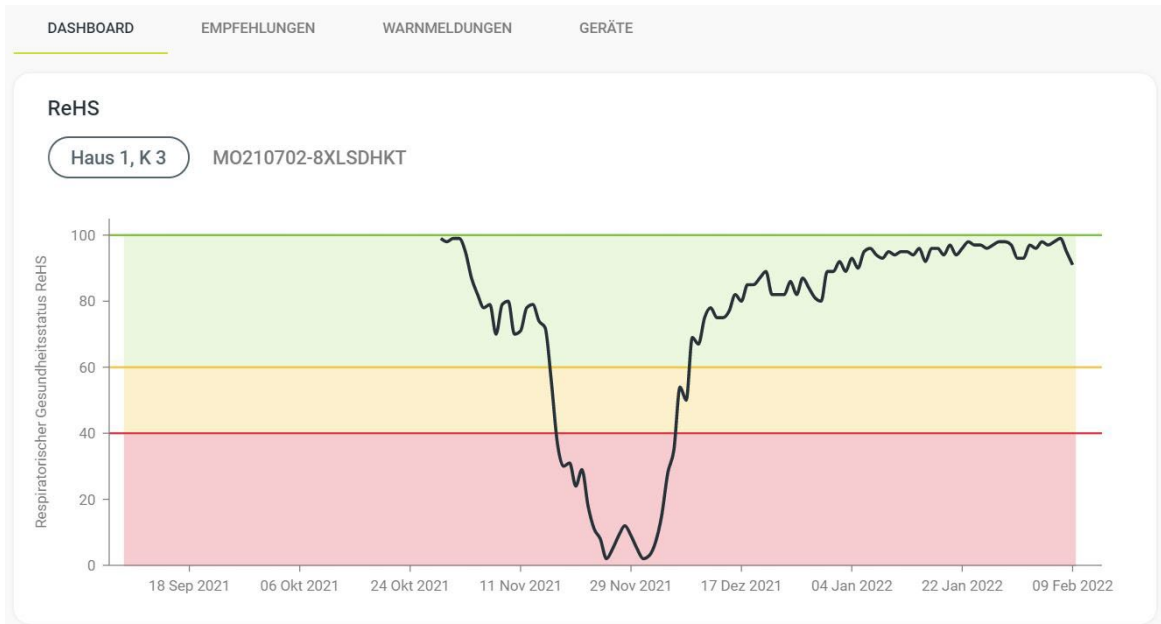

Was bedeuten die Farben?

Basierend auf dem respiratorischen Gesundheitsstatus (ReHS) -Score gilt: je höher der Wert, desto besser die Atemwegsgesundheit der Schweine:

o Wenn sich die ReSH-Linie innerhalb des grünen Bandes befindet, bedeutet dies, dass die „Tiere gesund“ sind und Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren können.

o Wenn sich die ReSH-Linie innerhalb des gelben Bandes befindet, weist dies auf „Potenzielle Atemwegsgesundheitsprobleme“ hin. Das Interventionsleitfadenprotokoll sollte angewendet werden.

o Wenn sich die ReSH-Linie innerhalb des roten Bandes befindet, weist dies auf ein „hohes Risiko für Atemwegsgesundheitsprobleme“ hin. Das Interventionsleitfadenprotokoll sollte angewendet werden.

Bei weiteren Fragen oder Feedback wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SoundTalks. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!